



**Veillez lire attentivement et intégralement ces instructions d'utilisation car elles contiennent des informations importantes pour vous. Ce dispositif médical peut être obtenu sans prescription. Cependant, les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO doivent être utilisées conformément aux instructions d'utilisation pour parvenir à un résultat de traitement optimal.**

- Gardez ces instructions d'utilisation. Vous pourriez avoir besoin de les relire.
- Si vous avez besoin d'autres informations ou d'un conseil, interrogez votre pharmacien.
- Si vos symptômes s'aggravent ou persistent, il est en tout cas impératif de consulter un médecin.

### Chère utilisatrice, cher utilisateur,

Merci d'avoir choisi Kijimea® Côlon Irritable PRO. Kijimea® Côlon Irritable PRO est un dispositif médical certifié pour le traitement du côlon irritable et disponible en pharmacie. Seul Kijimea® Côlon Irritable PRO contient la bifido-bactérie inactivée par la chaleur *B. bifidum* HI-MIMBb75. Kijimea® Côlon Irritable PRO n'a pas d'effets secondaires et d'interactions avec d'autres médicaments connus.

#### Ces instructions d'utilisation contiennent :

1. Qu'est-ce que les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO et dans quels cas sont-elles utilisées ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO ?
3. Comment prendre les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO et quelle est leur durée de conservation ?
6. Informations supplémentaires

### 1. Qu'est-ce que les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO et dans quels cas sont-elles utilisées ?

Ce dispositif médical contient la souche bifido-bactérienne inactivée par la chaleur *B. bifidum* HI-MIMBb75. Il est indiqué pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec les symptômes caractéristiques constipation, diarrhée, maux de ventre, ballonnements et distension abdominale.

### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO ?

Les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO ne contiennent pas de conservateurs, d'édulcorants, d'arômes, de fructose, de lactose ni de gluten et elles sont également adaptées pour les personnes souffrant de diabète.

#### Grossesse et allaitement :

Aucun élément connu ne s'oppose à l'utilisation de gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO au cours de la grossesse et lors de l'allaitement.

#### Enfants :

Aucun élément connu ne s'oppose à l'utilisation de gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO chez les enfants et les adolescents.

#### Médicaments et les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO :

Des interactions avec des médicaments ne sont pas connues. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### Autres indications :

Si de nouveaux symptômes apparaissent ou si les symptômes persistent, veuillez consulter un médecin afin de déterminer l'origine de ces symptômes et, le cas échéant déceler une maladie causale à traiter. N'utilisez pas ce produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants.

### 3. Comment prendre les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO ?

Veillez toujours prendre les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO en suivant les indications fournies par ces instructions d'utilisation. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Les instructions d'utilisation sont valables dans la mesure où votre médecin ne vous a pas fourni d'indication différente pour les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO. Veuillez respecter les instructions d'utilisation pour que les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO puissent agir correctement.

Avalez une gélule Kijimea® Côlon Irritable PRO par jour (si besoin deux gélules par jour) sans les croquer, avec une quantité de liquide suffisante (par exemple un verre d'eau).

Pour obtenir des résultats optimaux, les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO devraient être prises pendant une durée minimale d'un mois, au mieux trois mois.

Une amélioration initiale des symptômes devrait intervenir environ une semaine après le début d'une prise régulière.

### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

À ce jour, aucun effet indésirable lié à la prise des gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO n'a été constaté.

Les symptômes du syndrome du côlon irritable peuvent varier naturellement en apparence et en gravité. De plus, divers facteurs externes (p. ex. une alimentation inhabituelle et le stress) peuvent intensifier les symptômes. Par conséquent, dans certains cas, le syndrome du côlon irritable peut s'aggraver temporairement pendant la prise de Kijimea® Côlon Irritable PRO.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, veuillez en faire part au fabricant indiqué dans cette notice.

### 5. Comment conserver les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO et quelle est leur durée de conservation ?

Conserver les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO à une température inférieure à 25°C et dans un environnement sec.

Ce produit doit être tenu hors de la vue et de la portée des enfants. Les gélules Kijimea® Côlon Irritable PRO ne doivent pas être utilisées après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

### 6. Informations supplémentaires

Ce dispositif médical contient la souche bifido-bactérienne inactivée par la chaleur *B. bifidum* HI-MIMBb75.

Les autres composants sont : fécule de maïs, hypromellose, stéarate de magnésium, dioxyde de silicium, complexes cuivriques de chlorophyllines.

Kijimea® Côlon Irritable PRO est disponible en boîtes de 10, 30 et 90 gélules.

#### Kijimea® : Pour votre santé et l'environnement

Kijimea® accorde une grande importance à une utilisation responsable des ressources. La notice et l'emballage proviennent de papier à 100% recyclé.



Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage



#### Fabricant/distributeur :

Synformulas GmbH  
Am Haag 14 • 82166 Gräfelfing • Allemagne  
Tel. : +33 975 123 892 • Fax : +33 975 128 349  
info@synformulas.fr • www.kijimea.fr  
Date de mise à jour : août 2020